

TABLETTENMÖRSE ELEKTRISCH

59200

Bitte beachten Sie folgende Vorgaben, um zu verhindern, dass Sie sich Medikamentenstaub aussetzen.



Drücken Sie den grauen Clip, um den Mörser zu öffnen. Füllen Sie den Mörserbecher maximal bis zur ersten Markierung und legen Sie eine Schutzfolie mittig auf den Becher.



Setzen Sie das Metall-Mahlwerk auf den Becher mit Folie und drücken es nach unten. Stellen Sie nun Becher, Folie und Mahlwerk oben auf die Plattform des Tablettenmörser.



Bei eingeschaltetem Gerät beginnt der Mahlvorgang, wenn der Deckel geschlossen wird. Ansonsten drücken Sie die blaue Taste, um den Mahlvorgang zu starten. Ist der Mahlvorgang beendet, leuchtet die LED grün. Für ein feineres Mahlergebnis den Mahlvorgang wiederholen (z. B. bei Sondenernährung).



Nehmen Sie nach dem Mahlvorgang den Becher mit dem Metall-Mahlwerk aus dem Mörser.



Heben Sie das Mahlwerk vorsichtig an und überprüfen Sie es auf sichtbare Verschmutzungen. Schieben Sie die Schutzfolie über den Becherrand, um Medikamentenrückstände zu lösen. Entsorgen Sie die Folie.



Das Mahlwerk ist sofort wieder einsatzbereit.

Reinigung: Das komplette Gerät kann mit einem feuchten Tuch und bei Bedarf mit herkömmlichen Spülmittel gereinigt werden. Bei Verschmutzung des Mahlwerks dieses mit einem Zellstofftupfer und Alkohol reinigen. Das Mahlwerk ist spülmaschinengeeignet.

Hinweis: Den Becher vor Gebrauch auf Medikamentenrückstände überprüfen.

Zubehör: Medikamentenbecher [Art.-Nr. 59201], Deckel für Medikamentenbecher (Art.-Nr. 59202) und Schutzfolie [Art.-Nr. 59203].